

Agricol

Środki do pielęgnacji
i profilaktyki wymienia

AGRICOL TEST

Sposób postępowania:

Pierwsze strugi mleka zdajamy na przedzdajacz. Następnie z każdej ćwiartki na odpowiednie pola płytki do testowania doimy ok. 2 ml mleka. Dodajemy ok. 1 ml **AGRICOL TESTU**, delikatnie mieszamy i odczytujemy wynik.

Odczyt:



mieszanina płynna,
bez smug, barwy żółtej
- ok. 100 tys. komórek somatycznych.



mieszanina z lekkimi smugami,
barwy pomarańczowo-czerwonej
- ok. 200 tys. komórek somatycznych.



mieszanina z wyraźnymi smugami
lekko galaretowata,
barwy czerwono-fioletowej
- ok. 500 tys.- 1 mln. komórek
somatycznych.



mieszanina galaretowata,
barwy czerwono-niebieskiej
- ponad 1 mln. komórek somatycznych.



Adres:

AGRICOL

85-087 Bydgoszcz
ul. Gajowa 102

tel./fax: 52/342 41 07

gsm: 509 720 526

agricol@agricol.pl

oddział Wrocław:

52-454 Wrocław

ul. gen. Kaz. Pułaskiego 47/20

gsm: 509 736 821

wroclaw@agricol.pl

